

Instrukcja konfiguracji aplikacji xDrip+ z BluCon

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję xDrip+ ze strony:

<https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases>

2. Uwaga: wbrew różnym opiniom nie należy parować (Bluetooth) urządzenia mobilnego (telefonu) z BluCon z poziomu samych ustawień tego urządzenia. Parowanie należy wykonać za pomocą aplikacji xDrip+....
3. Otwórz aplikację i zaakceptuj wszystkie monity aplikacji xDrip+
4. Na ekranie głównym xDrip+ w górnym lewym rogu naciskamy „trzy kreski” (menu)
5. Następnie zakładka <USTAWIENIA>>SPRZĘTOWE ŹRÓDŁO DANYCH>>LIBRE BLUETOOTH>
6. Wracamy do ekranu głównego xDrip+ ponownie naciskamy „trzy kreski”
7. Naciskamy zakładkę <BLUETOOTH SCAN>
8. Następnie wciskamy igłą przycisk na BluCon (parowanie&reset) i nakładamy BluCon na sensor Libre.
9. W wcześniej otwartej zakładce <BLUETOOTH SCAN> naciskamy <SKANOWAĆ>(prawy górny róg) po paru sekundach aplikacja znajduje BluCon /BLU00XXX device/
10. Po wyświetleniu się /BLU00XXX/ klikamy na ten monit i wpisujemy sześciocyfrowy PIN, który znajduje się na krawędzi BluCon.
11. xDrip poprosi o uruchomienie sensora, jeśli nie, naciskamy „trzy kreski“ <START SENSOR>.Wybierz czas/datę aktywacji sensora gdy zostaniesz o to poproszony(ważne aby nie wpisywać czasu krótszego niż dwie godziny).Jeśli nasz sensor jest aktywny pomijamy ten krok..
12. Teraz BluCon wykona trzy pomiary kontrolne (czas oczekiwania około 15 do 25 minut)
13. Po wykonaniu trzech pomiarów kontrolnych zostaniemy poproszeni o wykonanie kalibracji.
14. Pierwsza kalibracja polega na wpisaniu dwóch wartości poziomu glikemi z krwi, mierzonych w odstępie pięciominutowym (WARTOŚĆ A= xxx , WARTOŚĆ B= xxx)
15. Od tego momentu aplikacja xDrip rozpocznie pracę z BluCon.

Dodatkowe ustawienia

1. Optymalizacja Bluetooth xDrip+. Naciskamy:
<USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>BLUETOOTH SETTINGS>>
zaznaczamy tylko:
-Turn Bluetooth on
-Bluetooth Watchdog
2. Uwaga ważne, upewnij się iż to ustawienie jest WYŁĄCZONE !!!
<USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>AGGRESSIVE SERVICE RESTARTS> !!!!
3. Wtyczki: AKTYWUJ !!!
<USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>ADVANCED CALIBRATION>NON-FIXED LIBRE SLOPES>

<USTAWIENIA>>MNIEJ ISTOTNE USTAWIENIA>>ADVANCED CALIBRATION>>CALIBRATION PLUGIN>>DATRICS-AE-PRONOUNCED:>